




BIOPSIEENTNAHME (HAUT) UND FIXIERUNGSVORSCHRIFT FÜR ELEKTRONENMIKROSKOPIE

Biopsieentnahme:

Bitte möglichst als Messerbiopsie, ohne mechanischen Druck und ohne Quetschung.

ca. 0,5cm lang 

Bei V.a. Bindegewebserkrankung: tiefe Biopsie bis zum subkutanen Fett von der Oberarm-Außenseite, **ca. 2-3cm vom Ellenbogengelenk entfernt**.

Bei V.a. blasenbildende Erkrankung: frische Blase (evtl. Blasenecke) mit angrenzender intakter Haut

Fixierung:

(Fixierungslösung : 3% Glutaraldehyd in 0,1 M Cacodylatpuffer)

Bitte bewahren Sie die von uns zugesandte Fixierungslösung im Kühlschrank auf.
Frisches Biopsat sofort unzerteilt in diese Fixierungslösung geben.
Gefäß bitte vollständig füllen, damit die Gewebeprobe nicht am Rand hängen bleibt und austrocknen kann, und sorgfältig verschließen.

Fixierungslösung + darin enthaltenes Biopsat wird ungekühlt per Post verschickt.

Zerkleinerung und Aufarbeitung erfolgt in Heidelberg.



EM Labor
Dr. rer-nat. Ingrid Haußer-Siller
Im Neuenheimer Feld 224
69120 Heidelberg
Tel. +49 6221 56-38591
Fax +49 6221 56-5767
Ingrid.hausser-siller@
med.uni-heidelberg.de

www.uniklinikum-
hd.de/pathologie

